

EXAMEN	Nature de l'échantillon biologique	Prélèvements acceptés	Délai rendu des résultats	TRANSPORT / CONSERVATION Sans précision : à transmettre dans la journée à T° ambiante	Précautions spéciales	Site analytique	Principe de la méthode et équipement (*)
ACIDE LACTIQUE	Sang	Sang total hépariné	1 j (< 2 h si urge)	< 30 min T° ambiante		Clinique Convert	GEM 5000
ACIDE URIQUE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ACIDE VALPROIQUE (Dépakine)	Sang	Sérum	1 à 4 j		Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ALBUMINE SERIQUE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ALPHA FOETOPROTEINE	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AMIKACINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AMPHETAMINES	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 j			Bretin	Immunochromatographie
AC ANTI THYROGLOBULINE	Sang	Sérum	1 à 4 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AC ANTI THYROPEROXYDASE	Sang	Sérum	1 à 4 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AC ANTI HBc (totaux)	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman) VIDAS
AC ANTI HBs	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AC ANTI-HÉPATITE A (IgM)	Sang	Sérum	1 à 4 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTIGENE CA 125	Sang	Sérum	1 j			Lalande	VIDAS
ANTIGENE CA 15-3	Sang	Sérum	1 j			Lalande	VIDAS
ANTIGENE CA 19-9	Sang	Sérum	1 j			Lalande	VIDAS
ANTIGENE CARCINO-EMBRYONNAIRE	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTIGENE HBs	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman) VIDAS
APO A1	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		A jeun (8 h minimum - 12 h recommandé)	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)

APO B	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		A jeun (8 h minimum - 12 h recommandé)	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BETA 2 MICROGLOBULINE	Sang	Sérum	1 à 4 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BILIRUBINE direct	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BILIRUBINE total	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BNP	Sang	Plasma EDTA	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
C D T	Sang	Sérum	1 à 7 j		Si analyse non prise en charge - Tarif Hors nomenclature : 19 Euros	Bretin	CAPILLARYS
C R P	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CALCIUM	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CALCIUM IONISE	Sang	Sang total hépariné	1 j (< 2 h si urgence)	< 30 min T° ambiante < 4 h réfrigéré		Clinique Convert	GEM 5000
CANNABIS	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 j			Bretin	Immunochromatographie
CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang	Sang total hépariné	1 j (< 2 h si urgence)	< 30 min T° ambiante < 4 h réfrigéré	Prélever rapidement le patient après l'exposition suspectée	Clinique Convert	GEM 5000
CHLORE	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CHOLESTEROL HDL	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		A jeun (8 h minimum - 12 h recommandé)	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CHOLESTEROL TOTAL	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		A jeun (8 h minimum - 12 h recommandé)	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
COCAINE	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 j			Bretin	Immunochromatographie
CORTISOL	Sang	Sérum	1 à 2 j		Prélèvement entre 7h00 et 9h00 ou à partir de 16h00 (en fonction de la prescription), préciser l'heure de prélèvement	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
COTININE	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 j		Tarif Hors nomenclature: 33 Euros	Bretin	Immunochromatographie
CREATINE PHOSPHOKINASE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CREATININE	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
D DIMERES	Sang	Plasma citraté	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	Sta Compact Max
GROUPE SANGUIN	Sang	Sang total EDTA	1 j (< 2 h si urgence)		Préciser si notion de transfusion récente	Lalande	IH 1000

DIGOXINE	Sang	Sérum	1 j (< 2 h si urgence)		Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
DIHYDROEPIANDROSTERONE SULFATE (SDHA)	Sang	Sérum	1 à 4 j		Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ELECTROPHORESE DES PROTIDES	Sang	Sérum	1 à 4 j			Bretin	CAPILLARYS
FACTEURS RHUMATOIDES	Sang	Sérum	1 à 4 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
FER SÉRIQUE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		De préférence à jeun le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
FERRITINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
FIBRINOGENE	Sang	Plasma citraté	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	Sta Compact Max
FOLATES SERIQUES (Vitamine B9)	Sang	Sérum	1 à 2 j		A jeun (8h00 minimum)	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
FSH	Sang	Sérum	1 à 2 j (< 2 h si urgence)		Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
G.O.T. (ASAT)	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
G.P.T. (ALAT)	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
GAZ DU SANG (PH, pCO2, pO2, Hb) et panel élargi sur appareil des gaz du sang (GLUCOSE, HEMATOCRITE, Na+, K+, Cl-)	Sang	Sang total hépariné	1 j (< 2 h si urgence)	< 30 min T° ambiante Éviter d'analyser l'échantillon plus de 15 min après le prélèvement Si l'analyse est retardée de plus de 30 min, envisager de placer l'échantillon sur de la glace	Expulser immédiatement l'air résiduel de la seringue et la reboucher. Mélanger l'échantillon immédiatement, en procédant à des inversions rapides (1 à 2 inversions /sec) > 30 sec. Éviter d'agiter vigoureusement l'échantillon Remélanger l'échantillon si l'analyse est retardée Déboucher la seringue et expulser le volume de l'embout de la seringue avant de l'introduire dans l'instrument Préciser : -Le type de prélèvement : artériel/veineux/Prélèvement post filtre dialyse -Le type de respiration : Respi/O2/VNI/post VNI/en air + % FiO2 ou débit d'O2 -La température	Clinique Convert	GEM 5000

GENTAMICINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
GGT	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
GLUCOSE	Sang/Urine/LCR	LCR Plasma hépariné Plasma sur fluorure de sodium Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)	Analyse sanguine : Tube gris : dans la journée T° ambiante Tube vert : < 4 h T° ambiante Analyse urinaire : Dans la journée T° ambiante	A jeun (8h00)	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
HAPTOGLOBINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
HCG	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		Préciser la date des dernières règles / Suspicion de GEU / Suivi post IVG/ITG ou fausse couche	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE HBA1c	Sang	Sang total EDTA	1 j			Vonnas	Variant II Turbo (biorad)
HEMOGRAMME	Sang	Sang total EDTA Sang total Citraté uniquement pour les plaquettes si amas plaquettaire sur EDTA	1 j (< 2 h si urgence)	Tube EDTA : dans la journée T° ambiante Plaquette sur tube citrate : < 8 h T° ambiante	Préciser si : -Traitement à l'héparine ou HBPM -Hémopathie connue -Traitement anticancéreux Plaquette sur tube citrate : Rendu uniquement si amas plaquettaire sur tube EDTA	Lalande	Yumizen H
IMMUNO TYPAGE DES PROTEINES SERIQUES	Sang	Sérum	1 à 4 j			Bretin	CAPILLARYS
IMMUNOGLOBULINES A	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
IMMUNOGLOBULINES G	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
IMMUNOGLOBULINES M	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
LACTO-DESHYDROGENASE (LDH)	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)	< 8 h T° ambiante		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
LH	Sang	Sérum	1 à 2 j (< 2 h si urgence)		Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
LIPASE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)

LITHIUM	Sang	Sérum	1 à 4 j		Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
MAGNESIUM	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
METHEMOGLOBINE	Sang	Sang total hépariné	1 j (< 2 h si urgence)	< 30 min T° ambiante < 4 h réfrigéré		Clinique Convert	GEM 5000
MICROALBUMINURIE	Urine	Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
MYOGLOBINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
NT-Pro BNP	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	VIDAS
OESTRADIOL	Sang	Sérum	1 à 2 j (< 2 h si urgence)		Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
OPIACES	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 j			Bretin	Immunochromatographie
P.T.H.	Sang	SÉRUM Plasma EDTA	1 à 2 j			Lalande	VIDAS
PHOSPHATASES ALCALINES	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PHOSPHORE	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)	< 8 h T° ambiante		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PLAQUETTES	Sang	Sang total EDTA Sang total Citraté uniquement si amas plaquettaire sur EDTA	1 j (< 2 h si urgence)	Tube EDTA : dans la journée T° ambiante Plaquette sur tube citrate : < 8 H T° ambiante	(Transmission tolérée le lendemain) Préciser si : traitement à l'héparine ou HBPM Plaquette sur tube citrate : Rendu uniquement si amas plaquettaire sur tube EDTA	Lalande	Yumizen H
POTASSIUM	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)	Tube vert : < 10 h T° ambiante Urines : dans la journée T° ambiante		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PREALBUMINE	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
Procalcitonine (PCT)	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	VIDAS
PROGESTERONE	Sang	Sérum	1 à 2 j (< 2 h si urgence)		Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)

PROLACTINE	Sang	Sérum	1 à 4 j		Prélèvement entre 8 h et 12 h, patient au repos depuis 15 min En cas de prescription de prolactine poolée : réaliser 2 à 3 prélèvements toutes les 20 min en restant au repos entre chaque prélèvement Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PROTEINES	Sang/Urine/LCR/ Liquide de ponction	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H LCR Liquide de ponction	1 j (< 2 h si urgence)		Proteines urinaires : éviter les périodes de règles chez les femmes Bien préciser l'origine de la ponction	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PSA LIBRE	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PSA TOTAL	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
RECHERCHE D'AGGLUTININES IRREGULIERES	Sang	Plasma EDTA	1 j (< 2 h si urgence)		Préciser si notion de traitement par Rophylac Préciser si notion de RAI positive connue Préciser la date de début de grossesse	Lalande	IH 1000
RESERVE ALCALINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
RETICULOCYTES	Sang	Sang total EDTA	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	Yumizen H
SEROLOGIE CYTOMEGALOVIRUS	Sang	Sérum	1 à 4 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SEROLOGIE MALADIE DE LYME	Sang	Sérum	1 j			Lalande	VIDAS
SEROLOGIE RUBEOLE	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SEROLOGIE TOXOPLASMOSE	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SEROLOGIE VIRUS EPSTEIN BARR	Sang	Sérum	1 j			Lalande	VIDAS
SEROLOGIE H.I.V. 1 et 2	Sang	Sérum	1 à 2 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SEROLOGIE HEPATITE C	Sang	Sérum	1 à 2 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SODIUM	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)

TAUX DE PROTHROMBINE	Sang	Plasma citraté	1 j (< 2 h si urgence)		Pour les personnes sous AVK : Préciser le nom du médicament et la cible INR et se reporter aux consignes spécifiques pour le moment de dosage	Lalande	Sta Compact Max
TCA TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE	Sang	Plasma citraté	1 j (< 2 h si urgence)	< 6h00 T° ambiante < 2h00 T° ambiante si traitement HNF	Préciser la notion de traitement HNF ou HBPM	Lalande	Sta Compact Max
TESTOSTERONE	Sang	Sérum	1 à 4 j		Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
THYROXINE libre (T4L)	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		Prélèvement de préférence le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TRANSFERRINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TRIGLYCERIDES	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		A jeun (8 h minimum - 12 h recommandé)	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TRIODOOTHYRONINE libre (T3L)	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		Prélèvement de préférence le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TROPONINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TSH	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		Prélèvement de préférence le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
UREE	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VANCOMYCINE	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)		Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicamentsVoir consigne spécifique pour le moment de dosageNe pas utiliser de tube avec gel séparateur	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VITAMINE 25 OH D (D2+D3)	Sang	Plasma hépariné	1 j (< 2 h si urgence)			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VITAMINE B 12	Sang	Sérum	1 à 2 j			Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VITESSE DE SEDIMENTATION	Sang	Sang total EDTA	1 j	< 8 h T° ambiante		Lalande	VSCUBE Menarini